

Sie haben heute die für Sie speziell angefertigten Einlagen erhalten. Folgendes sollten Sie dabei beachten, damit Sie beschwerdefreier gehen können.

- Benutzen Sie die Einlagen nur in dafür geeigneten Schuhen.
- Achten Sie auf die Seitenangabe rechts / links. Einlagen nicht seitenverkehrt tragen.
- Beginnen Sie das Tragen der Einlagen zunächst stundenweise morgens und weiten Sie die Tragezeiten langsam aus.
- Sie sollten dann die Einlagen stets tragen, damit ein Therapieerfolg erzielt werden kann.
- Kontrollieren Sie nach dem Tragen der Einlagen Ihre Füße auf Druckstellen und Blasenbildung.
- Tragen Sie die Einlagen stets mit Strümpfen.
- Lassen Sie Ihre Einlagen regelmäßig auf ihre Funktion und ordnungsgemäße Passform prüfen.
- Wir empfehlen bei Erwachsenen dies alle 3-6 Monate durchführen zu lassen, bei Kindern je nach Wachstum.
- Wenden Sie diese nur nach Anweisung des Arztes an, sonst kann kein Therapieerfolg erzielt werden.
- Die Einlagen sind ausschließlich für Ihre Füße nach Ihren Maßen sorgfältig hergestellt worden.
- Bei fehlerhafter Verwendung entfällt die Garantie und Haftung.
- Zur Pflege und Reinigung empfehlen wir Hautdesinfektionsmittel oder mit einem feuchten Tuch abwischen,
- aber nicht waschen.
- Sollten jedoch Beschwerden auftreten, so wenden Sie sich umgehend an uns.